

Gelodouble

 4 – 35 °C

Dublirna masa za kombinirano tehniko in ulite baze. / Duplicating material for combined work and the Chrome-Cobalt technique.
Dubliermasse für Kombitechnik und Modellguss. / Дублирующая масса для техники комбинирования и бюгельного протезирования.
КомБИнирлеу және бюгельді протездеу техникасына арналған қосарланушылық массасы.



Gelodouble raztopi na 93 °C. / Melt the Gelodouble at 93 °C. / Schmelzen Sie Gelodouble bei 93 °C.
Gelodouble расплавить на 93 °C. / Gelodouble 93 °C ертіу.



Ohladi ga na 42 °C. / Allow to cool down to 42 °C.
Auf 42 °C abkühlen lassen. / Охладить на 42 °C. / 42 °C салқындату.



Model namočti v vodo z 38 °C za 5 minut. / Soak the model for 5 minutes at 38 °C. / Das Modell 5 Min. bei 38 °C einweichen lassen. / Модель погрузить на 5 минут в воду 38 °C. / Модельді 38 °C су ішіне 5 минутқа батыру.



Odvečno vodo poprivnaj z robčkom. / Dry the model with a cloth. / Mit einem Tuch trockentupfen. / Лишнюю воду промакнуть салфеткой. / Артық суды сүлгімен малшыну.



Kiveto z modelom napolni z Gelodoublom. / Fill a casting ring with Gelodouble. / Gelodouble in Gießform einfüllen. / Кювету с моделью наполнить массой Gelodouble. / Модельмен кюветті Gelodouble массасымен толтыру.



Ohlajaj na zraku 60–90 minut. / Let it cool down in the air for 60 - 90 min. / 60 - 90 Min. an der Luft / Охлаждать на воздухе 60 - 90 минут. / Ауда 60-90 минут салқындату.



ali / or / oder / или / немесе

v vodi 40–60 minut. / in water for 40 - 60 min. / 40 - 60 Min. in Wasser abkühlen lassen. / Охлаждать в воде 40 - 60 минут. / Суда 40 - 60 минут салқындату.



Duplikat iz Gelodoublu napolni z vložno maso. / Fill the Gelodouble duplicate with the material. / Einbettmasse in Duplikat einfüllen. / Дубликат Gelodoubl – а заполнить паковочной массой. / Gelodouble қосарланушылығын – қаптамалық массасымен толтыру.



Ko se vložna masa strdi, odstrani Gelodouble in ga sperj z vodo. / Remove the Gelodouble when the material becomes hard and wash it with water. / Gelodouble nach dem Aushärten entfernen und mit Wasser spülen. После затвердения паковочной массы, удалить Gelodoubl и промыть его водой. Қаптамалық массасы қатайғаннан соң Gelodouble жойып, оны сумен жуу.