



Gelodouble S

Dublirna masa za dubliranje modelov iz mavca in vložnih mas ter za livno tehniko akrilatnih mas.
Duplicating material for plaster and investment material models and for acrylic casting technique.

Дублирующая масса для дублирования моделей из гипса и паковочных масс, а также для техники литья акриловых масс.



Gelodouble S raztopi na 93 °C.
Melt Gelodouble S on 93 °C.
Gelodouble S растапливать на 93 °C.



Ohladi ga na 48 °C.
Allow to cool down on 48 °C.
Охлаждать до 48 °C.



Model namoči v vodo na 38 °C 5 minut.
Soak model 5 minutes on 38 °C.
Модель замачивать на 38 °C 5 минут.



Odvečno vodo poprivnaj z robčkom.
Dry model with cloth.
Лишнюю воду промакнуть салфеткой.



Kiveto z modelom napolni z Gelodoublom S.
Fill Gelodouble S in the flask.
Кювету с моделью залить с Gelodoubl S.



Ohlajaj na zraku 60-90 minut.
Let cool down on air for 60-90 min.
60 - 90 min Охлаждать на воздухе 60-90 минут.



Odstrani model iz Gelodouble S. Duplikatпусти 10min na sobni temp. nato ga napolni z mavcem.
Remove model from Gelodouble S. Leave duplicate 10 min on room temperature than fill it with the plaster.
Удалите модель из Gelodouble S. Оставьте дубликат на 10 минут на комнатной температуре, затем заполните его гипсом.



Ko se mavce strdi, ga odstrani, Gelodouble S sperj pod vodo.
Remove Gelodouble S when plaster becomes hard and wash it with the water.
Оставьте гипс на 45-60 мин, пока не затвердеет. Затем его удалить.
Gelodouble S промыть чистой водой.

4 - 35 °C