

navodila za uporabo

Intersaw



Aparat za parelno rezanje modelov iz mavca, opremljen z modelno mizico za lažje rokovanje, lučko za osvetlitev delovnega področja ter laserjem za označitev mesta razreza.

Interdent d.o.o.

Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, Slovenija
Tel: +386/3-425-62-00, Fax: +386/3-425-62-10
E-mail: info@interdent.cc, www.interdent.cc

KAZALO

OPOZORILO	3
1 UPORABA.....	4
2 TEHNIČNI PODATKI.....	5
3 IZJAVA O SKLADNOSTI	6
4 GARANCIJSKI LIST ZA ARTIKEL 0682	7



OPOZORILO!



PRED MONTAŽO IN ZAGONOM APARATA SKRIBNO PREBERITE TA NAVODILA Z APARATOM LAHKO UPRAVLJAJO LE OSEBE, KI SO NATANČNO POUČENE O DELOVANJU IN NAČINU DELA.

POZOR: Aparat vedno postavite na trdno vodoravno podlago!

Pred priklopom preverite, če omrežna napetost odgovarja vrednosti 230V+/- 10%/50 Hz. Napravo smete priključiti na omrežno napetost preko enofazne vtičnice z zaščitnim ozemljitvenim kontaktom.



OPOZORILO!



Pred posegom v napravo obvezno izključite napravo iz omrežja . Vsak poseg v aparat sme opraviti izključno pooblaščen serviser. V nasprotnem primeru garancija propade.

Po opravljenem popravilu je treba preizkusiti napravo na prebojno trdnost in pregledati zaščitni vodnik. V primeru okvare, ki ne zagotavlja več varnega delovanja naprave, je treba preprečiti njeno nenamerno uporabo.

1 UPORABA

Napravo vklopimo na stikalu 0/1. Modelno žago priključimo na sesalni sistem. Laser za označitev mesta razreza vklopimo na črnem stikalu z napisom LASER. Individualno nastavljivo lučko za osvetlitev delovnega mesta vklopimo direktno na lučki. Na dodatno mizico fiksiramo model, ki ga želimo razrezati in ga privijačimo. Določimo nagib razreza, ki ga potrebujemo, da ne poškodujemo sosednjih zob. Fiksiramo zgornji del mizice. Določimo pozicijo mizice na magnetni podlagi in jo fiksiramo. Razrežemo tako, da z roko potegnemo rezilo navzdol. Da je diamantni disk aktiven, moramo zaradi varnosti držati rdeč gumb z nazivom UNLOCK.

Pred razrezom modela se moramo prepričati, da sta model in mizica dobro pričvrščena na podlagi.

! POMEMBNO

Pri montaži rezila privijemo pritrditveni vijak v OBRATNI SMERI URINEGA KAZALCA (v levo). Kot je označeno na instrumentu za vijačenje (glejte sliko).

Pri menjavi rezila odvijemo pritrditveni vijak z vrtenjem V SMERI URINEGA KAZALCA (v desno).



2 TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost	220/230V, 50Hz
Izhodna moč	70W
Hitrost vrtenja oz. število obratov	6000rpm
Premer diamantih rezil	63 do 80mm
Premer distančnikov za rezila	13, 16, 18, 20, 22mm
Debelina rezila	0,2 do 0,3 mm
Globina rezila	17 do 25,5 mm
Teža	6,6kg
Dimenzije (višina, širina, globina)	275 x160 x260 mm

3 IZJAVA O SKLADNOSTI

DECLARATION OF CONFORMITY

Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI -3000 Celje s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, naveden v tej izjavi skladen z navedenimi EU smernicami

We Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI – 3000 Celje declare that products below are in accordance with EU directives

Naziv izdelka: Modelna žaga
Name of the product: Model saw

Tip: Intersaw
Type: Intersaw

Upoštevane EU smernice:
EU directives:

- EU – niskonapetostna smernica: 73/23 EEC, 2006/95/EC
EU – low voltage directive: 73/23/ EEC, 2006/95/EC
- EU – smernica za elektromagnetno združljivost: 2004/108/EC
EU – directive for electromagnetic compatibility: 2004/108/EC
- EU – smernice za izgradnjo strojev: 2006/42/EC
EU – directive for machine construction: 2006/42/EC

Testne metode po standardih:

Test methods according standards

- EN61000-3-2 ed. 3: 2006 +A1:2010 + A2: 2010
- EN61000-3-3 ed. 2:2009, EN61000-6-1 ed. 2:2007
- EN61010-1:2003, EN61326-1:2006 + popravek - correction
- EN55011 ed. 2: 2007, skupina – group 1:2007 vrsta – type B A1, Z1
- 1:2007, EN ISO 12100-1,2 A1. 2004

Standart kakovosti: ISO 9001: 2008

Quality standard: ISO 9001:2008

Proizvod je varen za uporabo v standardnih pogojih. Vsaka sprememba proizvoda, ki ni odobrena s strani proizvajalca, razveljavnja to izjavo.

Product is safe in standard conditions. Any change of the product that is not approved by producer, repeals this declaration.

Mesto in datum izdaje: Celje dne 21.12.2011

Place and date of issue: Celje, 21. 12. 2011

Odgovorna oseba:

Responsible person:

Igor Grudnik, inž. elektr.
dipl. oec



Direktor:

Director:

Špela Zagožen Krsnik, univ.

4 GARANCIJSKI LIST ZA ARTIKEL 0682

Izdelek: INTERSAW

Serijska številka.

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca:

Garancijska izjava:

- Izdelek bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- Garancijska doba traja 12 mesecev od dneva prodaje. Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.
- Veljavnost garancije dokazujete s potrjenim garancijskim listom in original računom.

Garancija preneha veljati:

- Če v aparat posega nepooblaščen oseba
- Če niso upoštevana priložena navodila za uporabo
- Če je izdelek mehansko poškodovan
- Če so vgrajeni neoriginalni rezervni deli