

NAVODILA ZA UPORABO
GIBLJIVA LABORATORIJSKA SVETILKA



INTERDENT D.O.O.

Opekarniška cesta 26, 3000 Celje, Slovenija

Tel: +386/3-425-62-00, Fax: +386/3-425-62-10

Email: info@interdent.cc, www.interdent.cc

KAZALO


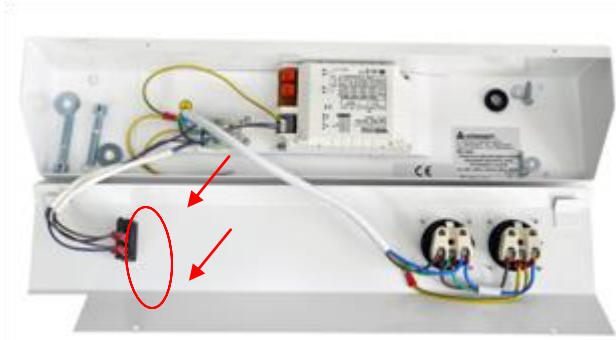

1 GIBLJIVA LABORATORIJSKA SVETILKA REF 0650	3
2 NAVODILO ZA MONTAŽO GIBLJIVE LABORATORIJSKE	3
3 NASTAVITEV GIBLJIVE ROKE SVETILKE.....	6
4 IZJAVA O SKLADNOSTI	7
5 GARANCIJSKI LIST ZA ARTIKEL 0650	8

1 GIBLJIVA LABORATORIJSKA SVETILKA REF 0650

Ergonomična zobotehnična svetilka z možnostjo regulacije višine in usmerjanja snopa svetlobe. Zagotavlja 97% spekter dnevne svetlobe in delovno površino razsvetljuje s 4200 luxi (oddaljenost od vira svetlobe 50 cm). Možno jo je montirati na stare zobotehnične mize. Zraven pridobite dve vtičnici za manjše priročne aparate na zobotehnični mizi. Enakomerno osvetli delovno površino zobotehnika.

2 NAVODILO ZA MONTAŽO GIBLJIVE LABORATORIJSKE

Ko odprete škatlo vzamete ven vse tri dele gibljive laboratorijske svetilke. Pri montaži sledite slikovnim navodilom.

<p>Vzemite spodnji del luči in odvijte vijaka pokrova.</p>	
<p>Odprite pokrov in pritrdite svetilko na delovno mesto z vijaki kot je prikazano na sliki.</p>	
<p>Napeljite priključni kabel skozi odprtino kot vidite na slikah.</p>	


Zvežite priključni kabel po barvah vodnikov kot vidite na sliki.




Sledi montaža gibljive roke svetilke. Roko svetilke pritrдите na spodnji del z vijakoma.



Pritrdite žico za ozemljitev iz podstavka svetilke na gibljivo roko, kot kaže slika.

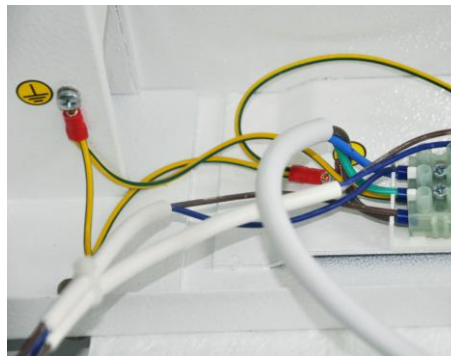


Pritrdite žice iz gibljive roke svetilke na elektroniko po priključnih številkah, kot kaže slika.

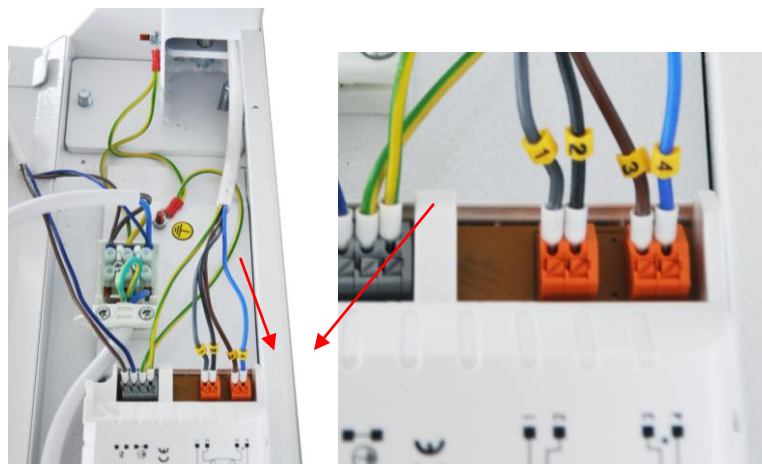


Nosilec svetilke z rasterjem pritrдите na zgornji del gibljive roke.



Na spodnji sliki je nosilec luči z rasterjem pritrjen na gibljivo roko svetilke. Privijte medeninasto matico in jo fiksirajte z vijakom.

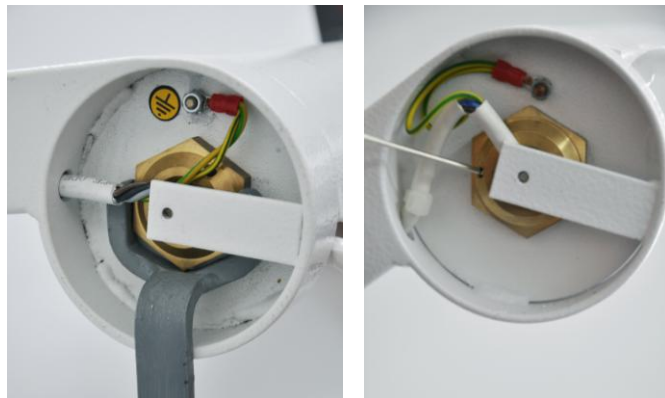

Zvežite žice po barvah vodnikov kot vidite na sliki.

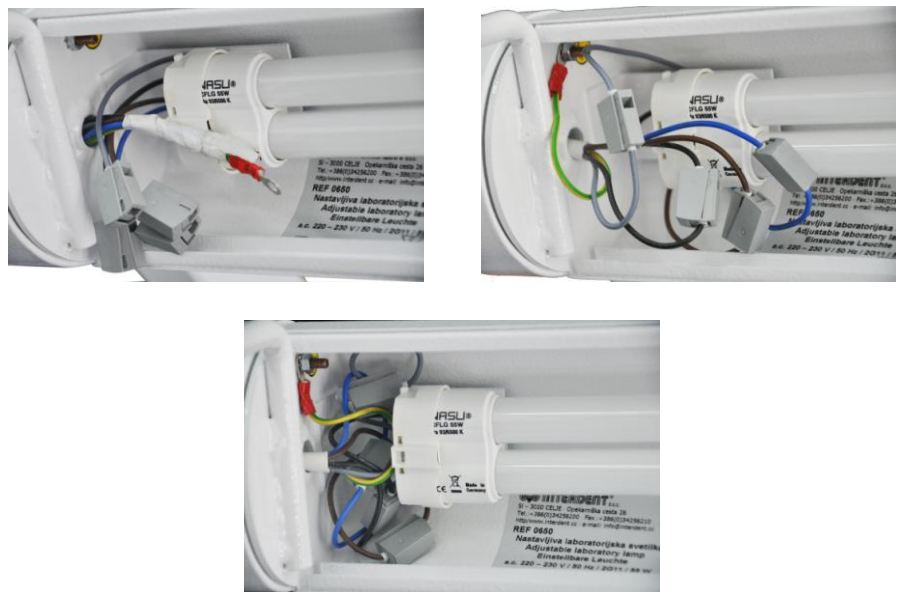

Stranske dele zaprite s pokrovi
kot prikazuje spodnja slika.



3 NASTAVITEV GIBLJIVE ROKE SVETILKE

Odstranite pokrove na gibljivi roki in vijake privijajte v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete želenega upora v nastavljivem delu laboratorijske svetilke. Za zmanjšanje upora vijake odvijajte v obratni smeri urinega kazalca.



4 IZJAVA O SKLADNOSTI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

IZJAVA O SKLADNOSTI

Dobavitelj / Supplier: INTERDENT d.o.o.
Naslov / Address: Opekarniška 26, SI – 3000 Celje

Hereby, we declare under our sole responsibility that the following product)

S polno odgovornostjo izjavljamo, da električna oprema

Vrsta proizvoda / Product name: Mobile dental laboratory lamp
Tip / Model – Type / Model: REF 0650
Blagovna znamka / Trade mark: Interdent
Proizvajalec / Manufacturer: INTERDENT d.o.o.
Naslov / Address: SI – 3000 Celje, Opekarniška 26

is in compliance with the requirements of regulations

za katero velja ta izjava, ustreza zahtevam predpisov

<p>Decree of technical requirements relating to electrical equipment, designed for use within certain voltage limits Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, (Uradni list RS, št.: 27/04)</p> <p><i>and fulfils the requirements of the following standards in zahtevam naslednjih standardov:</i></p> <p>Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC (Direktiva)</p> <p>SIST EN 60598-1:2000+A11+A12: Luminaires - Part 1: General requirements and tests SIST EN 60598-2-1:1995: Luminaires - Part 2: Particular requirements; section 2: Recessed luminaires</p>	<p>Regulations on electromagnetic compatibility Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, (Uradni list RS, št.: 84/01)</p> <p><i>and fulfils the requirements of the following standards in zahtevam naslednjih standardov:</i></p> <p>Directive 89/336/EEC, 93/68/EEC (Direktiva)</p> <p>SIST EN 50081-1: 1995: Electromagnetic compatibility - Generic emission standard - Part 1: Residential, commercial and light industry SIST EN 50081-2: 1999: Electromagnetic compatibility - Generic emission standard -- Part 2: Industrial environment -</p>
---	---

Date of issue of CE marking: 2005
Letnica označitve s CE oznako:

Place and date of issue
Kraj in datum izdaje:

Celje, 19. 04. 2005 _____

Name and signature
Ime, priimek in podpis:



5 GARANCIJSKI LIST ZA ARTIKEL 0650

Izdelek:

Serijska številka.

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca:

Garancijska izjava:

- Izdelek bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- Garancijska doba traja 12 mesecev od dneva prodaje. Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.
- Veljavnost garancije dokazujete s potrjenim garancijskim listom in original računom.

Garancija preneha veljati:

- Če v aparat posega nepooblaščen oseba
- Če niso upoštevana priložena navodila za uporabo
- Če je izdelek mehansko poškodovan
- Če so vgrajeni neoriginalni rezervni deli